


Odběrové pero FORA Vám umožní snadný a prakticky bezbolestný odběr kapilární krve z prstu (či jiných míst odběru).

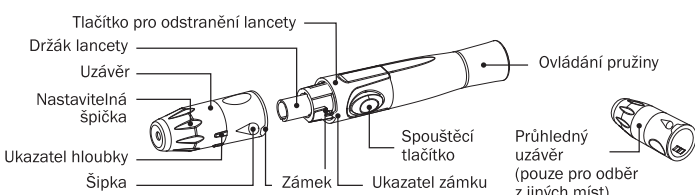

Odběrové pero nabízí 6 možností různě hlubokých vpichů:




VAROVÁNÍ


Nebezpečí infekce můžete snížit tím, že:

- Nebudete nikdy sdílet lancetu ani odběrové pero.
- Vždy použijete novou, sterilní lancetu. Lancety jsou jen na jedno použití.
- Zamezíte, aby se na lancetu, resp. do odběrového pera dostal krém na ruce, olej, špína či jiná drobná nečistota.
- Použité lancety mohou být považovány za nebezpečný odpad. Proto je prosím zlikvidujte tak, jak vyžadují místní zákony a směrnice.


Nastavení odběrového pera

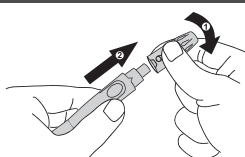


1. Otočte uzávěrem odběrového pera a vytáhněte jej.

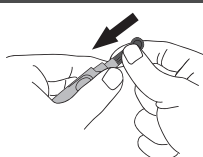


2. Do držáku lancety vložte lancetu a pevně ji zamáčkněte až nadoraz.

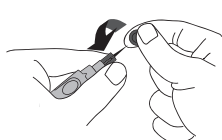

3. Odšroubujte ochranný kotouček nasazený na hrot lancety.

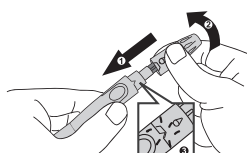

4. Vraťte uzávěr na místo a otočením doprava jej uzavřete tak, jak je vidět na obrázku. Uslyšíte cvaknutí. Je-li zámek správně zavřený, ukazatel zámku je úplně vpravo.

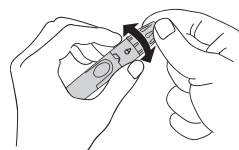

5. Otáčejte nastavitelnou špičkou jedním či druhým směrem tak, aby nakonec šipka směřovala k vybrané hloubce vpichu.




6. Zatažením za ovládání pružiny natáhněte pružinu, dokud neuslyšíte cvaknutí. Uvnitř spouštěcího tlačítka se změní barva, jakmile je pero připravené ke vpichu. ➤ **Pokud neuslyšíte cvaknutí, mohla se pružina natáhnout samovolně, když jste vkládali lancetu.**

POZNÁMKA

Před odběrem krve se prosím řiďte následujícími radami:


- Umyjte a osušte si ruce.
- Zvolte si místo odběru na bříšku prstu.
- Třete místo odběru asi 20 sekund před odběrem.
- Očistěte místo odběru vatou namočenou do 70% alkoholu a nechte oschnout.

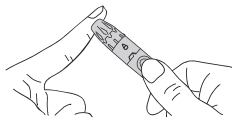

7. Odběr z prstu
Přiložte odběrovou stranu odběrového pera pevně k bříšku prstu. Stiskněte spouštěcí tlačítko a proveďte vpich do prstu. Cvaknutí oznámí, že vpich byl proveden.



8. Odběrové pero můžete odložit.
První kapku krve otřete čistým smotkem vaty. Jemně vymáčkněte další kapku. Neměli byste ji rozmáznout. Nechte vzorek krve nasát nasávací kanylou na testovací proužek.

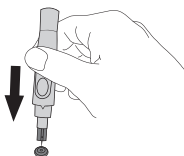

9. Chcete-li odstranit lancetu, otočte nejprve uzávěrem. Ochranný kotouček (prve odstraněný z lancety) položte na tvrdou podložku a hrot lancety do něj zapíchněte. Poté můžete lancetu bezpečně zlikvidovat.



10. Lancetu vysunete z držáku lancety tak, že stlačíte dopředu tlačítko pro odstranění lancety. Zlikvidujte lancetu tak, jak vyžadují místní zákony a směrnice.

➤ **Pro odběr vzorku krve z jiných míst, než je bříško prstu, použijte průhledný uzávěr.**

Odběr z jiných míst (AST)

POZNÁMKA

Tuto možnost nenabízí všechna odběrová pera. Pokud chcete odebrat vzorek krve z jiných míst než z prstu, prostudujte si nejprve kapitolu „K čemu přístroj slouží“ v Uživatelské příručce přiložené k Vašemu přístroji. Tam se dozvíte, zda daný systém tuto možnost nabízí.

Odběr z jiných míst než z bříška prstu je anglicky označován zkratkou AST. Dříve, než se rozhodnete k AST, přečtěte si prosím kapitolu **Jiné možnosti místa odběru** uvedenou ve Vaší Uživatelské příručce. Pro odběr z jiných míst je třeba vyměnit uzávěr odběrového pera za průhledný uzávěr používaný k odběru z jiných míst než z prstu. Zatažením za ovládání pružiny natáhněte pružinu, až uslyšíte cvaknutí. Pokud budete provádět odběr z předloktí, nadloktí, stehna či lýtka, vyberte místo bez zřetelně viditelných žil, abyste nezpůsobili nadměrné krvácení.

Čištění

- Lanceta je určena pouze na jedno použití.
- Odběrové pero je určeno pro opakované použití.
- Na očistění odběrového pera můžete použít jemné mýdlo a vodu.
- Přístroj **NENAMÁČEJTE** do vody.
- Uzávěr můžete desinfikovat tak, že jej na 10 minut ponoříte do 70% alkoholu a pak necháte oschnout
- Odběrové pero **NEPATŘÍ** do myčky. Nepoužívejte saponáty.

Význam symbolů

Symbol	Význam
	Nepoužívejte opakovaně
	Před používáním si přečtěte instrukce
	Použit do/ Datum spotřeby
	Číslo šarže
	Výrobce
	Výstraha, v příložených dokumentech najdete bližší informace
	Sterilní díky použití ozáření
	Nepoužívejte, pokud zjistíte, že je balení poškozené
	Číslo modelu